


Versandhinweise:

- Denken Sie daran, dass Sie Ihre Probe sofort nach Abschluss der Probennahme aufgeben müssen.
- Bitte füllen Sie den Einsendebogen vollständig aus.
- Legen Sie das gefüllte Blutentnahmeröhrchen in das SafeTpouch. Legen Sie dieses zusammen mit dem Einsendebogen in den Rücksendeumschlag und frankieren Sie diesen mit der zur Verfügung gestellten Briefmarke.
- Bitte bringen Sie den Rücksendeumschlag sofort zum nächsten Briefkasten oder Postfiliale um unnötige Verzögerungen im Versand zu vermeiden.
- Rücksendeumschlag und Probe sollen keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Bitte nicht an einem Freitag, am Wochenende oder vor/an Feiertagen versenden.
- Die Durchführung sollte idealerweise von Montag bis Mittwoch erfolgen.



Warnhinweise und  
Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht verwenden, wenn die Gerätepackung geöffnet wurde oder beschädigt ist.
- Nur zum einmaligen Gebrauch.
- Das Kit sollte nicht von Personen verwendet werden, die körperlich oder geistig nicht in der Lage sind, die Anweisungen zur Selbstentnahme richtig zu befolgen.
- Im Sitzen verwenden, da bei jeder Blutentnahme Ohnmachtsanfälle auftreten können.
- An der Probenahmestelle können leichte Blutergüsse, bleibende Spuren oder Narben auftreten. Hinweis: Das Auftreten oder die Schwere dieser Ereignisse hängen von den physiologischen Eigenschaften des Patienten und der gewählten anatomischen Stelle ab.
- Mehrere Entnahmen an derselben Stelle können das Risiko von Narbenbildung erhöhen und den Heilungsprozess beeinträchtigen.
- Nehmen Sie keine Entnahmen an Stellen vor, die Anzeichen von Hautproblemen wie Infektionen, Entzündungen, starker Narbenbildung oder Hautverletzungen aufweisen.
- Dieses Kit ist für die Verwendung durch Personen ab 18 Jahren und auf Anweisung eines Arztes oder einer Gesundheitsorganisation bestimmt.
- Nicht zur Verwendung an den Fersen von Kleinkindern geeignet.
- Bei Patienten, die Blutverdünner einnehmen, kann es zu verlängerten Blutungen kommen.
- Sollten bei Ihnen gesundheitliche Komplikationen wie übermäßige Blutungen, Schwellungen oder allergische Reaktionen auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt.
- Proben, die ohne Etiketten und/oder Einsendebogen eingehen, werden nicht untersucht.
- Proben, die bei der Ankunft im Labor Anzeichen von Zersetzung oder Beschädigung aufweisen, werden möglicherweise nicht untersucht. Darüber hinaus werden auch Proben, die mehr als 3 Tage nach der Entnahme eingehen, verworfen.

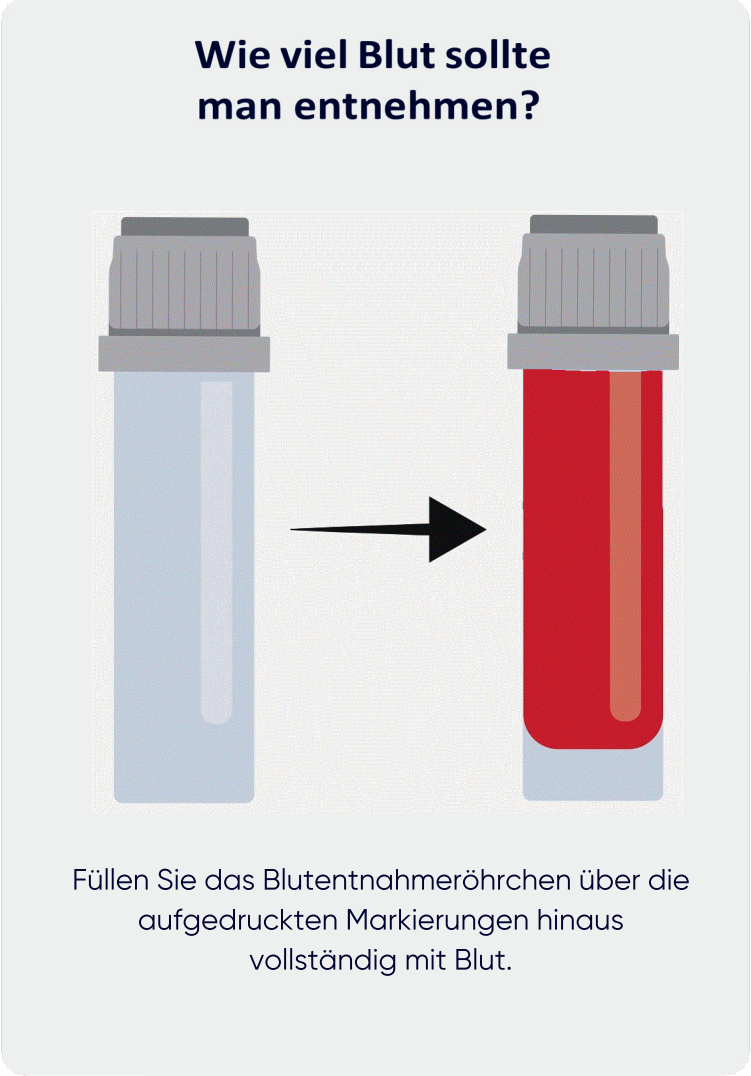

Inhalt des Kits:



Zweckbestimmung:

Entnahmekit für Kapillarblut mit Tasso-Entnahmevorrichtung und kompatiblen Blutentnahmeröhrchen für Kapillarblut. Kit zur Selbstentnahme und zum Transport von Kapillarblutproben für die professionelle Laboranalyse von Plasmablutparametern.

Dieses Kit enthält die Materialien, die für die Selbstentnahme der Probe oder die Entnahme durch einen Angehörigen der Gesundheits- oder Sozialberufe und die Rücksendung der Probe an das dafür vorgesehene Testlabor erforderlich sind.

Legende der Symbole

	Vor Sonnenlicht schützen		Gebrauchsanweisung lesen
	Trocken halten		Hersteller
	Nicht wiederverwenden		Chargencode
	Temperaturgrenze		Mindesthaltbarkeitsdatum
	In-vitro-Diagnostikum		Katalognummer
	Konformitätsbewertung im Vereinigten Königreich		Achtung, beachten Sie die beigefügten Dokumente
	CE-Konformitätskennzeichnung		Biologische Probe, als potenziell infektiös zu behandeln
	Mit Ethylenoxid sterilisiert		Eindeutige Gerätekennung
	Bei Beschädigung nicht verwenden		Durch Bestrahlung sterilisiert
	Nicht erneut sterilisieren		Begrenzung der Luftfeuchtigkeit beim Transport
	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Union		

Bevor Sie beginnen, überprüfen und  
kreuzen Sie die folgenden Schritte an:

- ☐ Bitte prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Verfallsdatum des Kits noch nicht abgelaufen ist. Wenn das Siegel des Kits beschädigt ist und Komponenten im Kit beschädigt sind, fehlen oder abgelaufen sind, verwenden Sie das Kit nicht und wenden Sie sich an Ihren Testanbieter.
- ☐ Die Durchführung dieses Testkits dauert ungefähr 15 – 30 Minuten. Lesen Sie die Anweisungen (dieses Faltblatt) sorgfältig durch, bevor Sie mit der Probenentnahme beginnen, da eine Nichtbeachtung der Anweisungen zu einer ungültigen Blutprobe führen kann. **Beachten Sie die Versandhinweise.**
- ☐ Die Probenentnahme sollte nüchtern erfolgen, am besten morgens direkt nach dem Aufstehen. Zu diesem Zeitpunkt ist in der Regel eine Fastenperiode von mindestens 8 Stunden gewährleistet, was optimale Bedingungen für den Test schafft.
- ☐ Trinken Sie 30 Minuten bis 1 Stunde vor der Entnahme 1 – 2 Gläser Wasser.
- ☐ Bevor Sie beginnen, sollten Sie alle für die Blutentnahme benötigten Materialien vor sich ausbreiten.
- ☐ **Halten Sie das Röhrchen beim Öffnen aufrecht** – es enthält ein Pulver.
- ☐ Drücken Sie NICHT den Knopf, bevor Sie die Vorrichtung an Ihrem Arm anlegen. Das Produkt ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- ☐ Manchmal spüren Sie möglicherweise nichts, wenn Sie den roten Knopf drücken. Entfernen Sie das Gerät in diesem Fall NICHT, es funktioniert weiterhin.
- ☐ Sollte nach ca. 15 Minuten kein Blutfluss oder eine unvollständige Füllung des Blutentnahmeröhrchens festgestellt werden, nehmen Sie die Tasso-Vorrichtung dennoch ab. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Testanbieter, der Ihnen weiterhilft.

Tut das weh?

Die Tasso-Vorrichtung dient zur Blutentnahme. Die Blutabnahme mit der Tasso-Vorrichtung ist eine einfache und nahezu schmerzfreie Alternative zur konventionellen venösen Blutabnahme. In wenigen Fällen können Schmerzen oder Beschwerden im Arm auftreten. Diese treten selten auf und dauern in den meisten Fällen nicht länger als einen Tag. Achten Sie darauf, den Knopf der Tasso-Vorrichtung nur einmal mit leichtem Druck ganz nach unten zu drücken und lassen Sie den Knopf anschließend wieder los. Bitte beachten Sie, dass in den ersten 1 – 2 Minuten möglicherweise kein Blut sichtbar ist – das ist ganz normal.

Wenn im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Kits ein schwerwiegender Zwischenfall auftritt, sollte dieser dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist, gemeldet werden.

Real Digital International Limited 2 Queensway | Croydon | Surrey | CR0 4BD | UK  
www.real-digital.co.uk

Casus Europe B.V.  
Lange Vijstraat 2 B  
3511BK Utrecht  
The Netherlands

1



Waschen Sie die Hände vor der Verwendung. Mitarbeiter im Gesundheitswesen müssen während der Entnahme Handschuhe tragen. Lesen Sie unbedingt den Abschnitt „Bevor Sie beginnen, überprüfen und kreuzen Sie die folgenden Schritte an“ vollständig durch.

2



Die Anbringung der Vorrichtung wird normalerweise drei Finger breit unterhalb der Mitte der Schulter empfohlen. Entfernen Sie überschüssiges Haar auf der ausgewählten Schulter, um beste Ergebnisse zu erzielen.

3



Legen Sie alle benötigten Materialien bereit. Entnehmen Sie die Tasso-Vorrichtung aus ihrer Verpackung. Öffnen Sie den Beutel, der Ihr Blutentnahmeröhrchen, die Tücher und Pflaster enthält.

4



Entfernen Sie die graue Kappe durch Drehen vom Fläschchen. Halten Sie dieses dabei aufrecht.

5



Drücken Sie das Entnahmeröhrchen in die Vorrichtung bis sie fest sitzt und die beiden Fülllinien nach außen zeigen.

6



Das Wärmepad wird aktiviert, indem das Metallplättchen im Inneren des Pads mehrmals kräftig gebogen wird. Nach Aktivierung wird dieses trüb und erreicht eine Temperatur von 45°C. Wird das Wärmepad nicht warm, entsorgen Sie dieses und nutzen Sie eine Alternative.

7




Drücken Sie das Wärmekissen etwa 5 Minuten lang sanft auf den Arm, bis die Stelle angenehm warm wird – eine leichte Rötung der Haut ist dabei ganz normal.

8




Reinigen Sie den Bereich mit dem Alkoholtupfer und lassen Sie ihn trocknen.

9

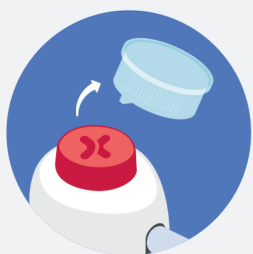


Entfernen Sie die durchsichtige Abdeckung vom roten Knopf Ihrer Tasso-Vorrichtung. **DRÜCKEN SIE NICHT** den roten Knopf bevor sich die Vorrichtung auf Ihrem Arm befindet.

10

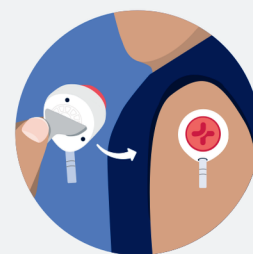


Ziehen Sie den Streifen von der Vorrichtung ab und kleben Sie die Vorrichtung auf den Oberarm. Lassen Sie den Arm gerade nach unten hängen.

11

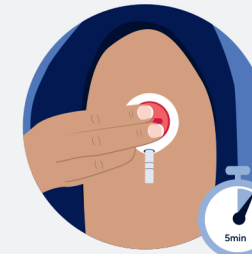

Drücken Sie den roten Knopf ganz nach unten und lassen Sie ihn dann los. Es kann sein, dass in den ersten zwei Minuten noch kein Blut austritt. Belassen Sie die Vorrichtung auf Ihrem Arm, auch wenn Sie nichts fühlen.

12

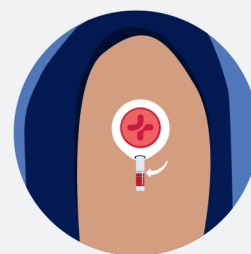

Entfernen Sie die Tasso-Vorrichtung, sobald das Entnahmeröhrchen vollständig mit Blut gefüllt ist. Sollte nach 15 Minuten kein Blutfluss oder eine unvollständige Füllung des Entnahmeröhrchens festgestellt werden, nehmen sie die Tasso-Vorrichtung ab.

13




Entfernen Sie das Entnahmeröhrchen mit einer leichten Drehung von der Tasso-Vorrichtung und ziehen Sie es nach unten.

14




Drücken Sie die graue Kappe wieder auf das Entnahmeröhrchen, bis sie hörbar einrastet.

15

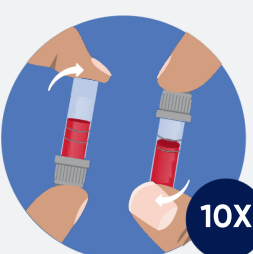


Drehen Sie das Entnahmeröhrchen vorsichtig 10 mal um, um das Blut zu mischen. Tippen oder schnippen Sie auf das Röhrchen, um das Blut in Bewegung zu bringen. Vermeiden Sie jedoch ein Schütteln.

16

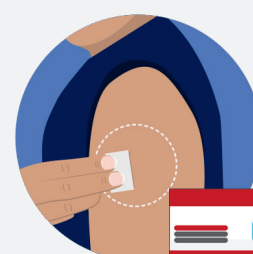


Lassen Sie das gefüllte Blutentnahmeröhrchen sicher auf einer ebenen Fläche stehen. Reinigen Sie Ihren Arm mit dem mitgelieferten Reinigungstuch und üben Sie 3–4 Minuten lang Druck aus.

17

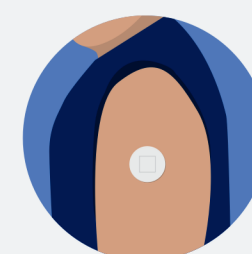


Tragen Sie das mitgelieferte Pflaster auf und üben Sie leichten Druck aus.

18

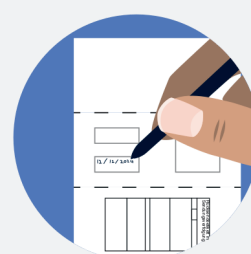

Füllen Sie den Einsendebogen aus und stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit der Probenentnahme auf dem Einsendebogen vermerkt sind.

19

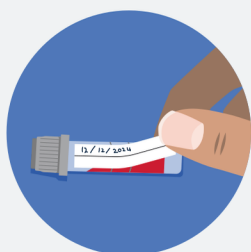

Ziehen Sie das Probenetikett vom Einsendebogen ab und kleben Sie es auf die Seite des Entnahmeröhrchens. Achten Sie dabei darauf, dass der QR-Code, der sich auf dem Etikett befindet, nicht verdeckt wird.

20



Legen Sie Ihr gefülltes und beschriftetes Entnahmeröhrchen in den SafeTpouch. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Vorderseite des SafeTpouch zum Verschließen. Legen Sie dieses in Ihren Rücksendeumschlag.

21



Reißen Sie den unteren Abschnitt Ihres Einsendebogens ab, der Ihren Rücksendeaufkleber enthält, und legen Sie ihn beiseite. **Falten** Sie den Rest des Einsendebogens zusammen und stecken Sie ihn ebenfalls in den Rücksendeumschlag.

22

Bevor Sie Ihre Probe einsenden:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Etikett an der Seite des Entnahmeröhrchens angebracht haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Einsendebogen vollständig ausgefüllt haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den SafeTpouch mit Ihrer Probe und den Einsendebogen in den Rücksendeumschlag gelegt haben.

23



Verschließen Sie Ihren Rücksendeumschlag. Bringen Sie das Rücksendetikett außen am Umschlag an und achten Sie darauf, dass die UN3373-Kennzeichnung nicht verdeckt wird.

24



Geben Sie Ihre Probe sofort nach Fertigstellung bei der Post ab. Entsorgen Sie die benutzten Bestandteile des Kits im Hausmüll.