

Präanalytik: (nur für geschultes Personal)

- Lagern Sie das Entnahmeröhrchen zur Blutgerinnung 30–60 Minuten aufrecht bei Raumtemperatur.
- Zentrifugieren Sie das Entnahmeröhrchen einmal bei 2000 g für 10 Minuten.
- Pipettieren Sie den Serumüberstand mit einer Einwegpipette in das Schraubverschluss-Mikroröhrchen. Achten Sie dabei darauf, das Blutgerinnsel nicht zu stören oder aufzuwirbeln. Für die anschließende Analyse der Blutprobe werden mindestens 400 µl Serum benötigt.
- Bringen Sie das Etikett (Einsendebogen, Abschnitt 2) seitlich am Schraubverschluss-Mikroröhrchen an und achten Sie darauf, den QR-Code auf dem Etikett nicht zu verdecken.
- Lagern Sie die Proben bis zum Versand bei –20 °C, ohne zusätzliche Gefrier-/Auftauzyklen.

Erforderliche, aber nicht im Kit enthaltene Materialien:

- Zentrifuge
- UN3373-Probenbeutel (95 kPa)
- Kühlelemente
- Transportbehälter


Stellen Sie sicher, dass das Versandstück den Anforderungen des ADR (Verpackungsanweisung P650) entspricht)



Kit zur Kapillarblutentnahme für die patientennahe Diagnostik (Serumproben)

Gebrauchsanweisung

Ab 18 Jahren

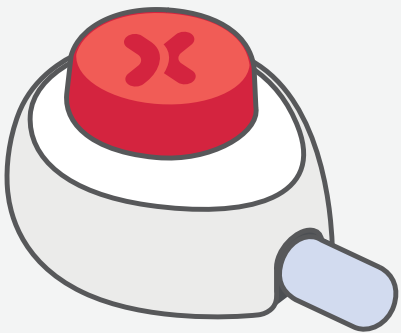

RDi

IVD UK CA CE REF KT10040




Scannen zum Ansehen

Warnungen und Vorsichtshinweise:

- Die Tasso-Vorrichtung wird steril geliefert. Verwenden Sie die Vorrichtung nicht, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Nur zur einmaligen Verwendung (Einmalprodukt).
- Das Kit darf nicht von Personen verwendet werden, die körperlich oder geistig nicht in der Lage sind, die Anweisungen zur Selbstentnahme richtig zu befolgen.
- Entnehmen Sie die Probe im Sitzen, da es bei jeder Blutentnahme zu Ohnmacht kommen kann.
- An der Entnahmestelle können leichte Blutergüsse, bleibende Hautveränderungen oder Narben auftreten. Hinweis: Das Auftreten und der Schweregrad dieser Begleiterscheinungen hängen von den physiologischen Merkmalen des Patienten und der gewählten Entnahmestelle ab.
- Mehrfache Entnahmen an derselben Stelle können das Risiko für bleibende Hautveränderungen oder Narbenbildung erhöhen und den Heilungsprozess beeinträchtigen.
- Führen Sie keine Entnahme an Hautarealen durch, die Anzeichen von Infektionen, Entzündungen, ausgeprägter Narbenbildung oder Verletzungen aufweisen.
- Dieses Kit ist für Personen ab 18 Jahren bestimmt und darf nur auf Anforderung von medizinischem Fachpersonal oder einer Gesundheitseinrichtung verwendet werden.
- Nicht zur Anwendung an Säuglingsfersen geeignet.
- Bei Patienten, die Blutverdünner einnehmen, kann es zu verlängerten Blutungen kommen.
- Sollten Komplikationen wie übermäßige Blutungen, Schwellungen oder allergische Reaktionen auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt.
- Proben mit unvollständig ausgefüllten Etiketten bzw. Einsendebögen werden nicht untersucht.
- Proben, die bei Ankunft im Labor Anzeichen von Hämolyse, Degradation oder Beschädigung aufweisen, können unter Umständen nicht untersucht werden. Zudem werden Proben abgelehnt, wenn sie mehr als 3 Tage nach der Entnahme im Labor eingehen.
- Alle verwendeten und nicht verwendeten Materialien gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgen.

Welche Blutmenge muss entnommen werden?

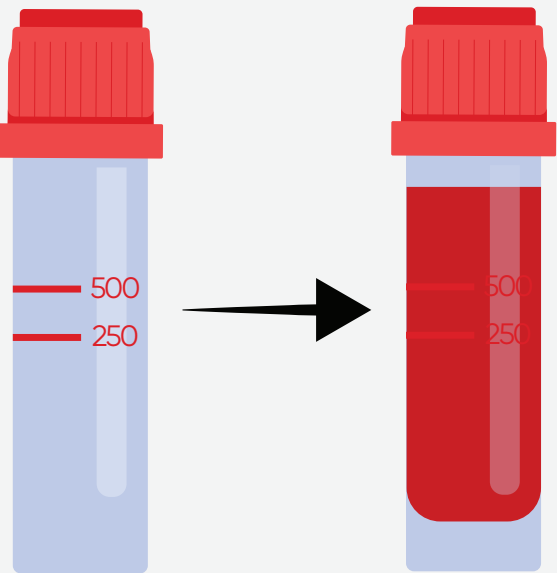

Füllen Sie das Röhrchen vollständig mit Blut. Das kann bis zu 5 Minuten dauern. Sobald das Röhrchen gefüllt ist, können Sie die Vorrichtung vom Arm abnehmen (auch wenn noch keine 5 Minuten vergangen sind).

Zweckbestimmung:

Kit zur Entnahme kapillarer Blutproben, bestehend aus einer Tasso-Kapillarblut-Entnahmevorrichtung und einem kompatiblen Probenröhrchen.

Das Kit enthält alle Materialien, die für die Eigenprobenahme durch den Anwender oder die Probenentnahme durch Angehörige der Gesundheitsberufe bzw. pflegerisches Fachpersonal erforderlich sind. Nach der Zentrifugation durch geschultes Personal dient das Kit der Lagerung und Kryokonservierung von Serumproben.

Nach der Probenentnahme bitten wir Sie um die Teilnahme an einer kurzen Umfrage. Scannen Sie hierzu den QR-Code und teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit.



Symbolerklärung

	Vor Sonnenlicht schützen		Gebrauchsanweisung beachten
	Trocken aufbewahren		Hersteller
	Nicht wiederverwenden		Chargenbezeichnung
	Temperaturbegrenzung		Verwendbar bis
	In-vitro-Diagnostikum		Artikelnummer
	UK-Konformitätskennzeichnung (UKCA)		Achtung, Begleiddokumente beachten
	CE-Konformitätskennzeichnung		Biologisches Risiko (potenziell infektiös)
	Sterilisiert mit Ethylenoxid		Eindeutiger Produktidentifikator
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Sterilisiert durch Bestrahlung
	Nicht erneut sterilisieren		Luftfeuchtebegrenzung
	Bevollmächtigter in der Europäischen Union		

Bevor Sie beginnen / Checkliste:

- ☐ Bitte prüfen Sie vor der Anwendung, dass das Verfallsdatum des Kits noch nicht überschritten ist. Falls das Siegel des Kits beschädigt ist oder wenn Komponenten beschädigt sind, fehlen oder das Verfallsdatum erreicht ist: Verwenden Sie das Kit nicht und kontaktieren Sie Ihren Arzt oder medizinisches Fachpersonal.
- ☐ **WICHTIGER HINWEIS:** Drücken Sie den Knopf erst dann, wenn Sie die Vorrichtung an Ihrem Arm positioniert haben. Die Vorrichtung ist ein Einmalprodukt.
- ☐ In manchen Fällen ist beim Drücken des roten Knopfes kein Reiz auf der Haut spürbar. **WICHTIGER HINWEIS:** Entfernen Sie die Vorrichtung in diesem Fall nicht, da die Entnahme dennoch erfolgt.
- ☐ Die Probenentnahme dauert etwa 15–30 Minuten. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung (dieses Beiblatt) sorgfältig durch, bevor Sie mit der Probenentnahme beginnen, da eine Nichtbeachtung der Anweisungen zu einer ungültigen Probe führen kann. Bitte beachten Sie auch die separat bereitgestellten Versandhinweise.
- ☐ Die Probe sollte nüchtern entnommen werden, idealerweise morgens unmittelbar nach dem Aufstehen. Zu diesem Zeitpunkt ist in der Regel eine Nüchternphase von mindestens 8 Stunden gewährleistet, was optimale Bedingungen für die Analyse bietet.
- ☐ Legen Sie vor Beginn alle für die Blutentnahme benötigten Materialien sowie einige saubere Papiertücher bereit.
- ☐ Halten Sie einen Timer bereit. Entfernen Sie die Tasso-Vorrichtung nach 5 Minuten, auch wenn kein Blutfluss einsetzt oder sich das Entnahmeröhrchen nicht vollständig gefüllt hat. Wenden Sie sich in diesem Fall für weitere Unterstützung an den Anbieter Ihres Kits.
- ☐ Trinken Sie 30–60 Minuten vor der Entnahme 1–2 Gläser Wasser.

Ist die Anwendung schmerzhaft?

Die Tasso-Vorrichtung dient der Blutentnahme. Die Blutentnahme mit der Tasso-Vorrichtung bietet eine einfache und nahezu schmerzfreie Alternative zur herkömmlichen venösen Blutentnahme. In seltenen Fällen können Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl im Arm auftreten. Diese Symptome sind selten und klingen in der Regel innerhalb eines Tages ab. Achten Sie darauf, den Knopf an der Tasso-Vorrichtung nur einmal fest zu drücken und ihn anschließend sofort wieder loszulassen. Bitte beachten Sie, dass in den ersten 1–2 Minuten möglicherweise kein Blut sichtbar ist. Das ist völlig normal.

Wenn im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Kits ein schwerwiegendes Vorkommnis auftritt, ist dieses dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist.

Real Digital International Limited 2 Queensway | Croydon | Surrey | CR0 4BD | UK
www.real-digital.co.uk

EC REP

Casus Europe B.V.
Lange Vijstraat 2 B
3511BK Utrecht
Niederlande

RDI-IFU-264, VERSION 1, 12.03.2026

Inhalt des Kits:




1



Waschen Sie vor der Anwendung Ihre Hände. Medizinisches Fachpersonal muss während der Entnahme Handschuhe tragen. Lesen Sie den Abschnitt „Bevor Sie beginnen / Checkliste“ vollständig durch.

2

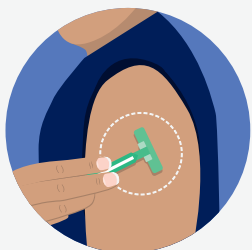

Platzieren Sie die Vorrichtung etwa drei Fingerbreit unterhalb der Schultermitte (empfohlen). Um optimale Ergebnisse zu erzielen: Entfernen Sie überschüssige Haare an der gewählten Stelle.

3




Legen Sie alle benötigten Materialien bereit. Entnehmen Sie die Tasso-Vorrichtung aus der Verpackung. Öffnen Sie den Beutel mit Röhrchen, Reinigungstüchern und Pflastern.

4




Schrauben Sie den roten Verschlussdeckel vom Röhrchen ab.

5

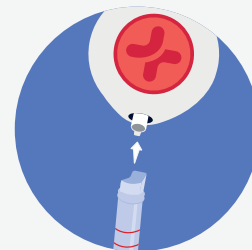


Drücken Sie das rote Röhrchen fest in die Vorrichtung, bis es sicher sitzt.

6

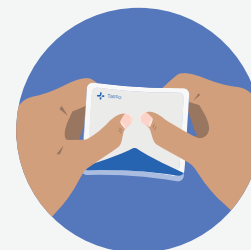


Aktivieren Sie das Wärmepad gemäß den Anweisungen auf der Vorderseite. Wenn das Wärmepad aktiviert ist, wird es trüb. Verwenden Sie eine alternative Methode zum Erwärmen, falls das Wärmepad keine Wärme entwickelt.

7

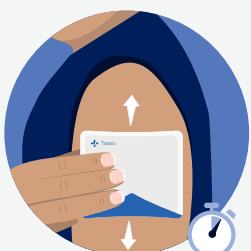

Reiben Sie zur Förderung des Blutflusses das Wärmepad mindestens 2 Minuten lang auf und ab über Ihre Schulter oder verwenden Sie eine alternative Erwärmungsmethode. Die optimale Dauer, bis der Blutfluss einsetzt, beträgt 5 Minuten.

8

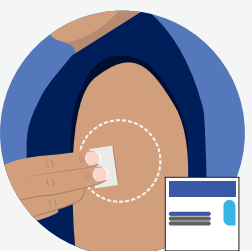


Reinigen Sie die Stelle mit dem Alkoholtupfer und lassen Sie diese trocknen.

9




Entfernen Sie die transparente Schutzabdeckung vom roten Knopf der Tasso-Vorrichtung. **WICHTIGER HINWEIS:** Den roten Knopf nicht drücken, bevor die Vorrichtung am Arm angebracht ist.

10

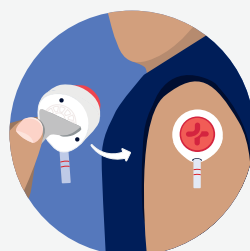


Ziehen Sie die Abziehfolie von der Vorrichtung ab und kleben Sie die Vorrichtung auf den Oberarm. Lassen Sie den Arm locker seitlich nach unten hängen.

11

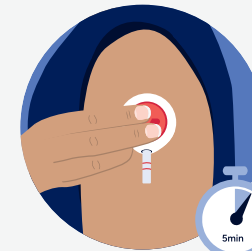


Drücken Sie den roten Knopf vollständig herunter und lassen Sie ihn anschließend los. Stellen Sie einen Timer auf 5 Minuten. In den ersten 2 Minuten erscheint möglicherweise noch kein Blut. Lassen Sie die Vorrichtung auch dann am Arm, wenn Sie nichts spüren.

12

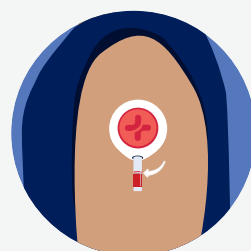

Nehmen Sie die Tasso-Vorrichtung ab, sobald das Röhrchen vollständig mit Blut gefüllt ist ODER nachdem 5 Minuten vergangen sind.

13

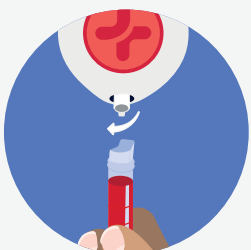


Ziehen Sie das rote Röhrchen mit einer leichten Drehbewegung nach unten aus der Tasso-Vorrichtung heraus.

14




Drücken Sie den roten Verschlussdeckel wieder auf das rote Röhrchen auf, bis er hörbar einrastet.

15

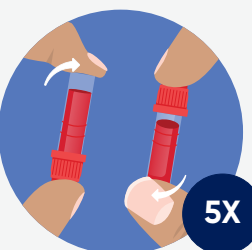


Invertieren Sie das rote Röhrchen vorsichtig 5-mal über Kopf, um das Blut zu mischen. Klopfen oder tippen Sie leicht gegen das Röhrchen, damit sich das Blut bewegt.

16

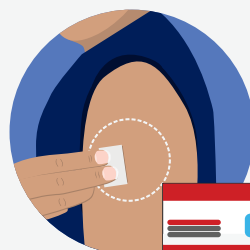

Stellen Sie das gefüllte rote Röhrchen sicher auf einer ebenen Fläche ab. Säubern Sie Ihren Arm mit dem mitgelieferten Reinigungstuch und üben Sie 3–4 Minuten lang Druck aus.

17

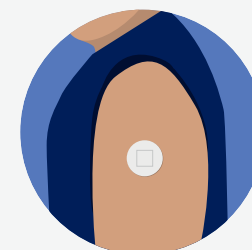


Bringen Sie das mitgelieferte Pflaster an und drücken Sie es leicht an.

18



Füllen Sie den Einsendebogen aus und stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit der Probenentnahme auf dem Beleg vermerkt sind.


19

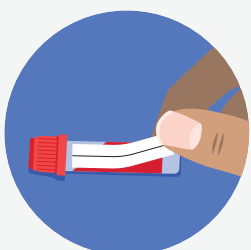

Ziehen Sie das Probenetikett vom Einsendebogen ab und bringen Sie es seitlich am Entnahmeröhrchen an. Achten Sie darauf, den QR-Code auf dem Etikett nicht zu verdecken.


Der folgende Abschnitt richtet sich an geschultes Personal

20

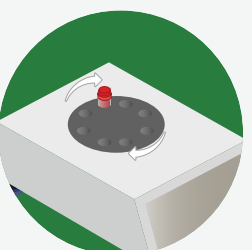

Lagern Sie das Entnahmeröhrchen 30–60 Minuten aufrecht bei Raumtemperatur. Zentrifugieren Sie es anschließend einmal bei 2000 g für 10 Minuten.

21

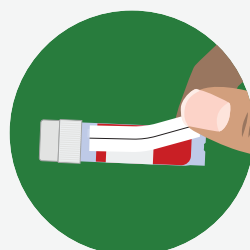

Pipettieren Sie den Serumüberstand mit der beiliegenden Einweg-Transferpipette in das bereitgestellte Schraubverschluss-Mikroröhrchen ab. Bringen Sie das zweite Etikett seitlich am Schraubverschluss-Mikroröhrchen an und achten Sie darauf, den QR-Code auf dem Etikett nicht zu verdecken.

22

Vor dem Versand der Probe:

- Die Proben müssen bis zum Versand bei -20°C gelagert werden, ohne zusätzliche Gefrier-/Auftauzyklen.
- Stellen Sie vor dem Versand sicher, dass ausreichend Kühlelemente, ein Polystyren-Behälter sowie ein UN3373-Probenbeutel (95 kPa) vorhanden sind.

23

Versand der Probe:

- Jede Sendung muss mind. 4 Kühlelemente enthalten, die mindestens 24 Stunden lang bei -20°C vollständig tiefgefroren waren.
- Stellen Sie sicher, dass das Schraubverschluss-Mikroröhrchen fest verschlossen und mit dem Probenetikett versehen ist sowie bei -20°C gefroren wurde, bevor Sie es zusammen mit absorbierendem Material in den UN3373-Probenbeutel (95 kPa) verpacken.